

## 取り扱い上の注意

### 装着前に点検していただくこと

A.C.Oは医師・理学療法士・義肢装具士などの指導にもとづき正しく装着してください。

- ネジやリベット部分にゆるみや異常があり身体を傷つける恐れがないか。
- プラスチック、内張り、ペルクロマジックに異常はないか。
- その他、変形や破損はないか確認してください。

### 上手な使い方

- 装具は身体に直接装着するのではなく、肌着の上から装着してください。
- 清潔に使用していただくためにも肌着が汚れましたら、新しい肌着に取り替えて使用してください。
- 使用中にゆるみやズレが生じた場合は正しく装着しなおしてください。
- 安全・清潔に使用していただくために、定期的に点検・清掃してください。

### お手入れ

- プラスチック部の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。ひどい汚れについては、水で薄めた中性洗剤に布を浸しかたく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 内張りは取り外して洗濯することができます。洗濯の際は手洗いのみ可能です。
- 布類の汚れは水で薄めた中性洗剤で手洗いをし、よく水ですすぎ陰干しで乾かしてください。
- 漬け置き洗いはしないでください。
- 洗濯機、乾燥機、アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 本製品のお手入れに、シンナーやベンジン等の薬品を使用しないでください。本体や内張りに薬品や芳香剤をかけないでください。

### 使用しないとき

- 直射日光や高温・極寒・多湿の場所を避けて保管してください。

### ご注意

- 補装具に破損等の異常が発生したときは、かかりつけの医師または弊社までご連絡ください。
- 皮膚に異常が発生したり、身体への局部的圧迫感やシビレを感じた場合はすぐにかかりつけの医師にご相談ください。
- 定期的に医師の診察を受け正しく使用してください。
- 補装具は医師の処方にもとづいて製作されていますので、絶対に他人に転用しないでください。
- 改造や修理には知識と技術が必要です。ご自身では絶対に改造・分解・修理・加工をしないでください。
- 調整につきましても医学的知識が必要な場合がありますので、かかりつけの医師にご相談ください。
- 本製品の装着は本使用説明書の装着方法に従い正しく装着してください。
- フィッティングに関して不具合が生じた場合には、医師または義肢装具士にご相談ください。
- 使用状況や使用期間によっては本製品が破損する場合があります。破損したままの使用は絶対におやめください。
- 本製品は頸椎の固定および保持を目的としていますが、頸椎の運動を完全に固定するものではありません。
- 本製品を使用する際には使用説明書を熟読した上で説明書に従ってください。
- 本製品は使用期間や使用状況によって各部分が磨耗したり破損したりする場合があります。ケガなどの危険を伴うことがありますので、速やかに医師または義肢装具士に相談し、修理または破損部の交換をしてください。
- 使用中は医師の指示に従い、無理な動き（運動）は避けてください。
- 本製品の改造等は絶対に行わないでください。勝手な改造により破損し傷等をつくられた場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は頸椎の固定および保持を目的としています。これらの目的以外で使用しないでください。
- 長期間使用しなかった場合の再使用時には、医師または義肢装具士に本製品の品質と装着状況を確認してから装着してください。
- 装具を装着したままで入浴しないでください。

# A.C.O

## ADJUSTABLE CERVICAL ORTHOSIS



A.C.Oは頸椎の固定及び保持が目的です。

## ご使用になる前に


ご使用になる前にこの取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。  
この取扱説明書はいつでも見ることのできる場所に保管し、必要なときにお読みください。

### 各部の名称



### ジョイントの固定

ジョイント部の固定は①と②のノブを同時に右に回すことで締め付け固定できます。その際に③部分のネジ山がかみ合うことと、①と②のノブが両方とも隙間なく締め付けていることを確認してください。

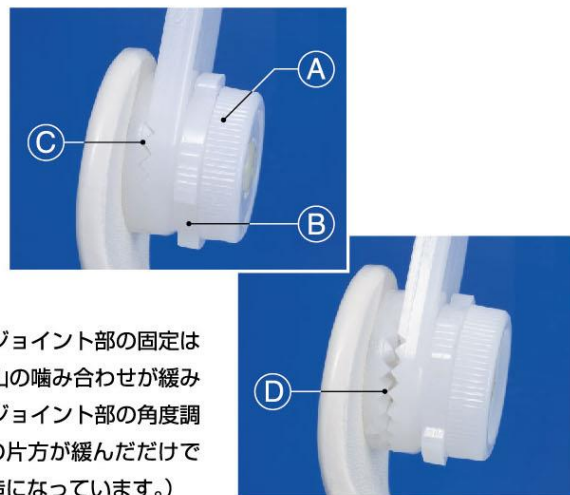

### ジョイントの解除

①と②のノブを同時に左に回すことでジョイント部の固定は解除されます。その際に③部分のネジ山の噛み合わせが緩み隙間ができていないことを確認してからジョイント部の角度調整を行ってください。（①と②のノブの片方が緩みただけではジョイントの固定は解除されない構造になっています。）

## 装着手順

①



A.C.O.の装着前にジョイント部のネジをすべて緩めてください。A.C.O.の後部躯幹プレートを装着します。後部躯幹プレートが身体の中線とA.C.O.の正中が一致していることを確認してください。

②



A.C.O.の前部躯幹プレートを装着します。後部躯幹プレートが身体の中線とA.C.O.の正中が一致していることを確認してください。

③



次にベルクロマジック2カ所（④ベルクロマジック：肩部）と（⑤前面下部ベルクロマジック）を固定してください。（仮止めです）

ベルクロマジック（⑥）については、最初にベルクロマジックのオスメス両面ついている部分を前部躯幹プレート下部のオスマジック部に取り付けてください。そして後部躯幹プレート下部のオスマジック部に（⑦後面下部ベルクロマジック）を固定してから再び前部躯幹プレート部に取り付けてください。

④



装着者の頸椎のアライメントに合わせてジョイント部のネジを固定してください。（ジョイントの調節方法は前項を参照してください。）なお頸椎のアライメントは医師の処方を確認して調節してください。

ジョイント部の固定を確認した後（⑧ベルクロマジック：下顎部）のベルクロマジックを下顎部のオスマジック部に取り付けてください。

最後にもう一度ベルクロマジック（④、⑤、⑥、⑧4カ所）とジョイント部を固定しなおし、フィッティングを確認したら装着完了です。