

小児用超音波エコー台 PECORA (ペコラ) 取扱い説明書

サイズ 全長 80 cm 全幅 46 cm 全高 24 cm 重さ 2.6 k g

写真はシート無しで撮影しています



- ビーズクッションの上に防水シート・布・タオル等を敷いてご使用ください
- お子さんを抱きかかえ、上からそっとビーズクッションに沈み込ませます。

注意事項

- ◇ ビーズクッション本体の洗濯は出来ませんが、生地部分のつまみ洗いは可能です。
- ◇ ビーズは熱に対して弱く、100度ぐらいで溶けますので乾燥機は避けてください。
- ◇ 破れてしまった場合は、中のビーズが出ないように応急措置としてテープを貼るなどした上、弊社までご連絡下さい。(有償修理)
- ◇ ナノビーズを誤って飲み込んでしまった場合、口や鼻から入った場合は、消化されずに排出されますので心配はありません。口や鼻に残留しているビーズは洗い流してください。但し、気分が悪くなったり、体に異常を感じた場合は直ちに専門医にご相談ください。耳から入った場合は無理に取り除こうとせず、直ちに専門医にご相談ください。目から入った場合は清潔な流水で洗浄し、専門医にご相談ください。
- ◇ カバーは伸縮性のある生地を使用しており、ご使用頻度によっては若干柔らかくなり張りが無くなってきます。中身のナノビーズは微粒子ですが発泡体ですので、度重なる加圧により一粒一粒の形状が球体から楕円形に変形してしまいます。よって目減りを感じられる場合がございます。
- ◇ 仕様・性能は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

商標登録第5766259号
意匠登録第1535360号
特許第6207772号

●本製品に関するお問い合わせは…

有限会社永野義肢

〒570-0043

大阪府守口市南寺方東通5丁目23番8号

TEL : 06-6993-7860

FAX : 06-6993-7887

メールアドレス miyabe-po@naganogishi.jp

担当 _____ 宮部 _____