

装着手順



1 前腕をスリングに収納します。
肩ベルトをリングカンに通して折返し、固定します。



2 胸ベルトをリングカンに通して折返し、固定します。



3 ブロックが脇下の適切な位置にくるよう肩ベルトで調整してください。



4 前腕固定ベルトをリングカンに通して折返し固定します。



5 それぞれのベルトを適度に締め直します。余分な長さはハサミでカットします。



6 肩パット、胸パットがそれぞれ、適切な位置にくるよう移動させてください。



7 最後にもう一度、すべてのベルトが確実に固定されているか、ブロックが良好な位置に装着されているかご確認ください。



簡単クイック脱着

①前腕固定ベルトを外し
②赤いレバーを矢印方向にスライドさせると、ロックが解除され外すことができます。

バックルを差し込むとロックされます。



● 30°に角度調整をする場合



ブロック面は面ファスナーで連結されていますので、容易に外すことができます。ブロックを取り外し、調節してください。

● スリングのみ装着する場合



スリングのみ使用する場合、肩ベルトをスリング本体のリングに取り付けてください。

● 悪い装着例

ベルトがゆるい場合、ブロックが脇の下から離れ、良好な姿勢がとれません。ベルトはしっかり締めてください。




肩外転装具Ⅱ

・使用状況や期間によっては本製品が破損する場合があります。破損したままの使用は絶対におやめください。

使用説明書

ご使用になる前にこの説明書をよく読み、正しくお使いください。この説明書はいつでも見ることのできる場所に保管し、必要なときにお読みください。

●各部の名称

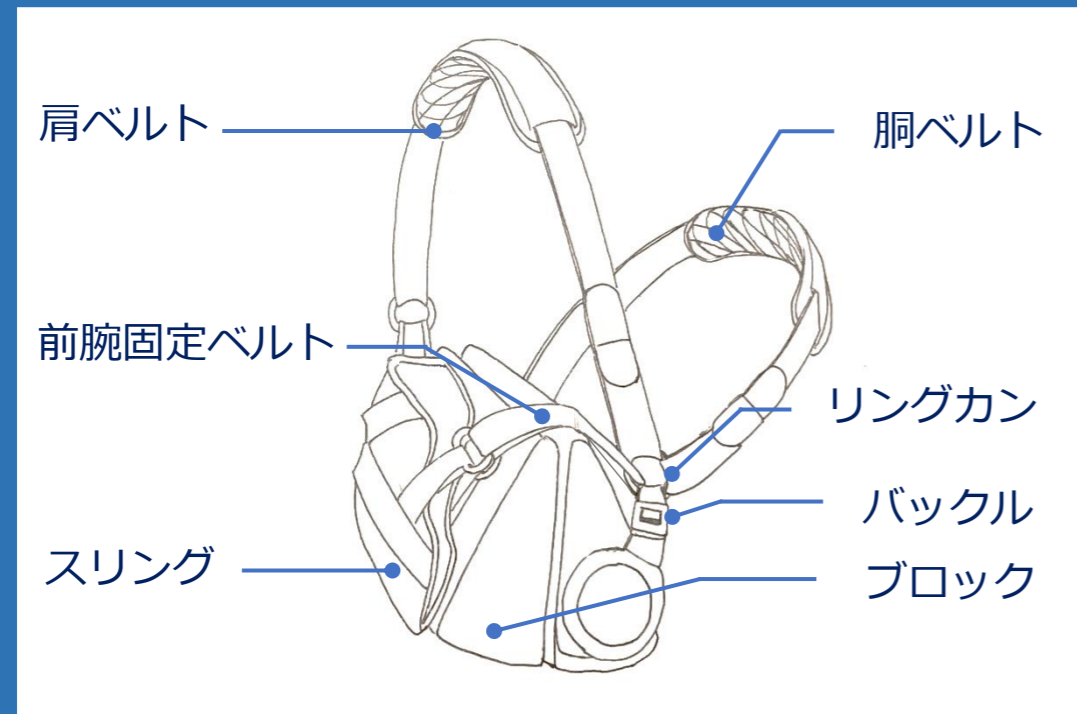

取り扱い上の注意

本装具は医師・理学療法士・義肢装具士などの指導に基づき正しく装着してください

装着前に点検していただくこと

- ・ブロック、ベルト、面ファスナー、バックルに異常はないか。
- ・ベルトにゆるみがあり、身体を傷つける恐れがないか。
- ・その他、変形や破損はないか確認ください。

上手な使い方

- ・装具は身体に直接装着するのではなく、肌着の上から装着してください。
- ・清潔に使用していただくためにも肌着が汚れましたら、新しい肌着に取り替えて使用してください。
- ・使用中にゆるみやズレが生じた場合は、正しく装着しなおしてください。
- ・安全・清潔に使用していただくためにも、定期的に点検・清掃してください。

お手入れ

- ・ブロックの汚れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- ・スリングとベルトは取り外して洗濯ができます。洗濯の際は、手洗いのみ可能です。
- ・洗濯機、乾燥機、アイロン、塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ・お手入れに、シンナーやベンジン等の薬品は使用しないでください。

使用しないとき

- ・直射日光や高温・極寒・多湿の場所を避けて保管してください。

ご注意

- ・補装具は医師の処方に基づいて製作されていますので、絶対に他人に転用しないでください。
- ・改造や修理には知識と技術が必要です。ご自身では絶対に改造・分解・修理・加工をしないでください。
- ・フィッティングに関して不具合が生じた場合には、医師または義肢装具士にご相談ください。
- ・補装具の装着において手や腕の痺れが生じた場合には、医師や看護師または義肢装具士へすぐにご相談ください。
- ・使用状況や期間によっては本製品が破損する場合があります。破損したままの使用は絶対におやめください。
- ・使用中は医師の指示に従い、無理な動き（運動）は避けてください。

●本製品に関するお問い合わせは…